



Wund- und Heilgel

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten müssen.

Kleine Verletzungen, wie Abschürfungen, Schnittwunden oder Verbrennungen gehören für Kinder und Erwachsene zum Alltag. Keime und Bakterien können in die Wunde eindringen und eine Infektion verursachen. Mit einer geeigneten Wundbehandlung wird die Wunde optimal geschützt und heilt aus.

Erster Schritt bei der Wundbehandlung ist die Entfernung von Verunreinigungen, wie z. B. Schmutz oder kleinen Steinchen. Hier empfiehlt sich die Verwendung von SOS Wund-Reinigungsspray oder Wasser. Nachdem die Wunde aufgehört hat zu bluten, kann das SOS Wund- und Heilgel auf die gereinigte Wunde aufgetragen werden. Das Gel kühlt die Wunde, ist schmerzlindernd und wirkt abschwellend. Zudem beugt es Infektionen vor.

Gemäß des Prinzips der feuchten Wundheilung wird die Wunde befeuchtet und Verkrustungen werden abgelöst. Unter dem Feuchtigkeitsfilm des Gels können sich die Hautzellen schneller entwickeln und teilen. Die Wunde heilt rascher und die Narbenbildung wird reduziert. Das Gel kann für den Aufbau des Feuchtigkeitsfilms mehrmals täglich aufgetragen werden. Bei einem Wundauflagenwechsel reduziert sich durch den Film über der Wunde die Gefahr, dass Teile der neu gebildeten Haut an der Auflage haften bleiben.

SOS Wund- und Heilgel ist auch für die Versorgung sensibler Haut und für die Anwendung bei Kindern geeignet. SOS Wund- und Heilgel ist klinisch getestet, lässt sich leicht auftragen und ist bei Bedarf auch für eine langfristige Anwendung geeignet.

Anwendungsgebiet:

Wund- und Heilgel für die Reinigung, Befeuchtung und Heilung akuter Wunden, z. B. Riss- und Schnittwunden, Verbrennungen ersten und zweiten Grades.

Anwendung:

Die Wunde sollte zunächst sorgfältig mit SOS Wund-Reinigungsspray oder Wasser von allen Schmutzpartikeln gereinigt werden und nicht mehr nässen oder bluten. Danach SOS Wund- und Heilgel auf die akute Wunde auftragen. Bei Bedarf mehrmals täglich wiederholen. Ein Pflaster oder Verband kann zur Abdeckung verwendet werden.

Anwendungseinschränkungen:

Schwangerschaft und Stillzeit: Anwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Säuglinge und Kleinkinder: Anwendung nur nach Rücksprache mit dem Arzt.

Kontraindikation:

- Nicht verwenden bei bekannten Allergien auf Polyhexanid oder Benzylalkohol.
- Nicht verwenden in Kombination mit anionischen Tensiden.

Hinweise:

Tube nach Gebrauch verschließen. Vor Frost und Hitze schützen. Verfalldatum und Chargennummer sind auf dem Faltschachtelboden und der Tubenfalz aufgedruckt. Nicht nach Ablauf des Verfalldatums verwenden. Nur unbeschädigte Tuben verwenden. Vor Kindern sicher aufbewahren. Vor Anwendung bei Verbrennungen kontaktieren Sie im Zweifel Ihren Arzt, um den Grad der Verbrennung zu bestimmen.

Nur zur äußerlichen Anwendung. Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Für Kinder geeignet.

Zusammensetzung:

Elektrolythaltiges Gel stabilisiert mit EDTA; Polyhexanid 0,02 %

Inhalt: 30 g Gel

Hersteller:
DISTRICON GmbH
Am Joseph 15, D-61273 Wehrheim



Hergestellt in Deutschland

Stand der Information: 2014.09

REV 04

Für Experten-Video

QR-Code scannen:

SOS unterstützt die:



persönliche
Experten-Beratung:
0800 000 50 40
gebührenfrei